

## ELEKTRICKÁ NOSNÁ ODSÁVAČKA NAsALEX

Zariadenie pre nos pre deti



### NÁVOD

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si kúpili náš skvelý produkt - elektrickú nosnú odsávačku pre deti Nasalex. Jemne uvoľní upchatý nos vášho dieťaťa. Zmierňuje dýchavičnosť, zlepšuje pocit pohody a pomáha liečiť prechladnutie vášho dieťaťa. Nastaviteľný sací výkon a nabíjanie na USB.

**Skôr ako začnete používať túto elektrickú nosnú odsávačku, pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny.**

#### **VLASTNOSTI:**

- Päť prevodových stupňov je možné nastaviť a vybrať jedným tlačidlom, jednoducho a pohodlne pre splnenie rôznych potrieb
- Potravinárska silikónová sacia hlava a tryska, jemná a šetrná k pokožke
- Odnímateľný dizajn pre pohodlné čistenie
- Ergonomický dizajn s ľudskými krivkami, pohodlný na držanie
- Dizajn pre nabíjanie s USB káblom, ľahké nabíjanie a odolnosť pri používaní
- Dizajn proti spätnému toku môže zabrániť odtoku hlienu späť do nosa

## OBSAH BALENIA

- 1 x nosná odsávačka (hlavná jednotka)
- 2 x sacia tryska
- 1 x balenie hubiek,
- 1 x USB kábel



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Napätie motora: 3V

Maximálne vákuové nasávanie: 350mmHg (60kPa)

Podmienky skladovania: -10 -55°C (relatívna vlhkosť zostáva v rozmedzí 85 percent)

Prevádzkové podmienky: 16 - 35°C (relatívna vlhkosť zostáva v rozmedzí 85 percent)

Dĺžka USB kábla: približne 77cm

Materiál: Silikón

Vhodný vek: 0-6 rokov

2 veľkosti špičiek nosa :

Typ Tekvička: Vhodné pre novorodencov

Typ Lievik: 2 roky alebo starší



## UPOZORNENIA

Nedodržanie týchto upozornení a montážnych pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

- Tento produkt nie je hračka
- Tento výrobok je určený na odstránenie nadbytočného nosového hlienu. Nepoužívajte na žiadny iný účel.
- Pred použitím sa uistite, že silikónová plastová tryska je pevne pripevnená na vstupnom konci.
- Výrobok by sa mal obmedziť na osobné použitie. Nezdieľajte výrobok s inými osobami, pretože to môže pomôcť šíriť infekčné choroby.
- Výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na žiadny komerčný alebo lekárske účel.

- Pred otvorením veka utrite puzdro do sucha.
- Výrobok neumývajte a nečistite riedidlom, benzénom alebo akýmkoľvek rozpúšťadlom.
- Prestaňte používať výrobok, ak je poškodený alebo deformovaný silným úderom alebo ho vráťte predávajúcemu, ak je výrobok chybný.
- Výrobok je určený len na kompetentné použitie dospelou osobou; akékoľvek použitie samotným dieťaťom je prísne zakázané.
- Nepoužívajte výrobok na iný účel, ako je odsávanie detského nosného hlienu.
- Je prísne zakázané umiestniť trysku na nosnú dierku dieťaťa na dlhšiu dobu; niekoľko sekúnd je postačujúcich na odstránenie hlienu.
- Nekladte trysku do nosnej dierky; dotyk s vonkajšou stranou nosnej dierky bude stačiť na to, aby stroj fungoval správne.
- Nepoužívajte výrobok, ak sa vyskytne akákoľvek rana, príznak zápalu alebo krvácania nosa alebo po liečbe ORL.
- Uistite sa, že ste výrobok vyčistili pred a po použití s odkazom na sekciu čistenia.
- Výrobok uchovávajte na suchom a chladnom mieste.
- Nosnú odsávačku udržujte mimo zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, kachle a iné spotrebiče. Teplo môže poškodiť puzdro alebo elektrické časti.
- Výrobok sa nesmie používať na lekárske účely. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém súvisiaci so zdravím, okamžite prestaňte používať výrobok a poraďte sa s kvalifikovaným lekárom.

## NÁZVY ČASTÍ



1. TRYSKA
2. PUZDRO
3. ÚLOŽNÝ PRIESTOR HLIENU
4. SACIE TELESO

## POKYNY NA MONTÁŽ



Časti, ktoré majú byť inštalované.  
priestoru



Nainštalujte kryt úložného  
priestoru



Nainštalujte kryt a otočte ho v smere hodinových ručičiek  
špičku / trysku



nakoniec nainštalujte

Ak chcete spotrebič rozobrať, postupujte podľa krokov v opačnom poradí.

**Vždy sa uistite, že filtračná špongia je vložená pod úložným priestorom. Keď je filtračná špongia znečistená, musí byť vymenená. Vymeňte ju a nainštalujte ju tak, ako je popísané vyššie.**

### PRED POUŽITÍM:

1. Pred použitím namočte saciu trysku do teplej slanej vody po dobu 10 minút na dezinfekciu, potom nasadte nosnú odsávačku podľa návodu. Zapnite spínač a začnite s odsávaním nosových exkrementov z nosnej steny.

2. Čo **robiť s vysušeným hlienom?** Použite fyziologický roztok alebo nosový sprej, ktorý si kúpite. Vstrekujte do nosných dierok a po štyroch až piatich minútach použite odsávačku.

### 3. Nabíjanie produktu:



Pri nabíjaní produktu pripojte USB kábel k nabíjačke (nie je súčasťou dodávky) alebo k počítaču. Pri nabíjaní sa rozsvieti červené svetlo; po dokončení sa rozsvieti zelené svetlo.

**4. POZOR:** pamätajte, NEPOUŽÍVAJTE HRUBÚ SILU ALEBO POMOC PRI ODSÁVANÍ SUCHÉHO DETSKÉHO NOSA!

#### NÁVOD NA OBSLUHU:

1. Nainštalujte nosovú odsávačku podľa vyššie uvedených pokynov a stlačte spínač na spustenie.


Nastavte úroveň odsávania:



Stlačením tlačidla spustíte zariadenie na nízkej úrovni 1.  
Stlačte tlačidlo dvakrát na spustenie nízkej úrovne 2.  
Stlačením tlačidla trikrát spustíte strednú úroveň 3.  
Stlačte tlačidlo štyrikrát na spustenie vysokej úrovne 4.  
Stlačte tlačidlo päťkrát na spustenie vysokej úrovne 5.  
Stlačením tlačidla šesťkrát vypnite zariadenie.

2. Ak sú nosové exkrementy suché, môžete najprv použiť fyziologický roztok alebo nosový sprej na postrek do nosnej dierky. Cca 1-2 min pred odsávaním, vstreknite fyziologický roztok do nosovej dierky dieťaťa na uvoľnenie hlienu a na pomoc pri odsávaní.

3. Držte dieťa vzpriamene a vložte špičku do nosa dieťaťa. Dávajte pozor, aby ste špičku neumiestnili príliš ďaleko do nosnej dierky alebo zatlačte na vnútornú stenu nosnej dierky. Uistite sa, že špičku odsávača držíte v uhle 90 stupňov. Nasmerujte nahor v nosnej dierke. Nechajte odsávačku pracovať asi 3-5 sekúnd a sledujte tok hlienu do zbernej komory. Opakujte v nosných dierkach a podľa potreby.

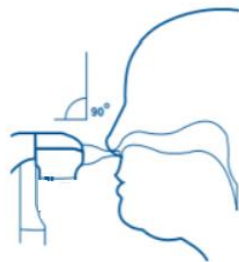

**ZÍSKAJTE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY:** keď používate odsávačku v jednej nosnej dierke, jemne utesnite druhú nosnú dierku prstom (1-2 sekundy), čo uľahčí odsávanie.

4. Vyčistite súčasti.

**UPOZORNENIE:** NIKDY nevkladajte odsávačku príliš hlboko do nosnej dierky. Nikdy neumiestňujte špičku pevne na vnútornú stenu nosnej dierky. Nikdy nepoužívajte na uši, ústa alebo oči. Táto odsávačka je určená na čistenie zápchy v nosných priechodoch. Zariadenie nepoužívajte na nič iné ako jeho zamýšľaný účel.

**POZNÁMKA:**

- Prosím, poraďte sa so svojim lekárom o tom, kedy a ako často by ste mali odsať nosové dierky vášho dieťaťa.
- Keď vidíte, že zásobník sa naplní, zastavte zariadenie a vyčistite ho.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití vyčistite saciu trysku a iné umývateľné časti.

Najskôr rozoberte všetky montážne časti. Oddel'te odsávaciú časť odsávačky od základne umiestnením palca pod špičku a oddelením odsávačky. Uchop'te puzdro a vyťahnite ho (ak je ťažké ho otočiť trochu v smere hodinových ručičiek). Teraz odstráňte aj úložný priestor hlienov otočením v smere proti smeru hodinových ručičiek.

Zásobník, puzdro a tryska dôkladne očistite vodou. Sterilizujte vriacou vodou alebo parou.



Poznámka:

Hlavná časť nie je umývateľná, prosím, nedávajte do vody na čistenie. Nepokúšajte sa vyčistiť hlavnú jednotku opláchnutím vodou, pretože nie je odolná voči vode. Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku, utrite ju mäkkou vlhkou handričkou.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Sacia hlava nie je správne nainštalovaná	Skontrolujte saciu hlavu a uistite sa, že je správne nainštalovaná (postupujte podľa pokynov).
	Zásobník je príliš plný alebo špinavý	Vyčistite zariadenie ako je uvedené v časti "Čistenie".
	Zariadenie môže byť vybité.	Nabite zariadenie.
Odsávanie je slabé alebo nenasáva vôbec.	Zariadenie je vybité	Nabite zariadenie.
	Zásobník je príliš plný alebo špinavý	Vyčistite zariadenie ako je uvedené v časti "Čistenie".
Neviditeľný výtok z nosa v nosovej dutine	Sacia tryska sa nedotýka nosa, musíte odsávať na princípe podtlaku ako pri smrkaní	Nechajte dieťa stáť alebo v polohe ležmo, hlavu hore (ak je nos suchý, najprv použite fyziologický roztok alebo nosový sprej na zvlhčenie nosnej dutiny).



## Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s inými odpadmi z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia pred nekontrolovaným zneškodňovaním odpadu; zodpovedne ho recyklujte, aby sa podporilo udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite návratové a zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, kde bol produkt zakúpený. Oni môžu zobrať tento produkt pre environmentálne bezpečné recyklácie.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.